

Инструкция по медицинскому применению
медицинского изделия

Наименование медицинского изделия
Лактагель®

Состав и описание медицинского изделия
В одном тубике (5 мл) содержится: молочная кислота – 225 мг, гликоген, пропиленгликоль, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия лактат, вода.
Не содержит гормонов и консервантов.
рН геля составляет 3,8.

Область применения
Гинекология

Назначение
Во влагалище в естественных условиях встречаются бактерии различных групп, при этом в самых больших количествах обычно представлены лактобактерии. Лактобактерии, перерабатывая гликоген, поступающий из клеток эпителия влагалища, вырабатывают молочную кислоту, поддерживая тем самым низкий уровень рН во влагалище, что создает неблагоприятные условия для развития патогенных бактерий и грибов. Это естественный и очень эффективный механизм защиты от бактерий.
Если количество лактобактерий уменьшается и уровень рН поднимается, происходит размножение «плохих» бактерий. Это состояние называется бактериальным вагинозом (БВ). К основным симптомам, связанным с БВ, относятся: неприятный запах, аномальные выделения и влагалищный дискомфорт. БВ – это очень распространенное заболевание у женщин.
Факторы, способствующие развитию бактериального вагиноза:

- Продолжительная менструация
- Курсы антибиотиков
- Частое и чрезмерное использование средств интимной гигиены
- Незащищенный половой акт (сперма может изменять рН влагалища в щелочную среду)
- Использование внутриматочной контрацепции (ВМК, который обычно называют спиралью).

Подробнее о роли спринцевания в развитии бактериального вагиноза

Нередко женщины при возникновении симптомов бактериального вагиноза самостоятельно прибегают к спринцеванию, связывая неприятный запах с недостаточной гигиеной. При этом спринцевание вызывает еще большее обострение бактериального вагиноза, поскольку при этом вымывается нормальная микрофлора, замещаясь условно-патогенными бактериями.

Лактагель® – гель, содержащий молочную кислоту и гликоген. Молочная кислота способствует снижению рН влагалища (т.е. созданию более кислой среды). Гликоген является питательной средой, необходимой для размножения лактобактерий. Нормализуя (снижая) значение рН и создавая соответствующие условия для размножения лактобактерий, Лактагель® восстанавливает естественную среду во влагалище и устраняет симптомы: обильные выделения, дискомфорт и неприятный запах.

Меры предосторожности (безопасности)

Следует избегать применения геля Лактагель® во время попыток зачатия, так как низкие значения рН влагалища негативно сказываются на активности сперматозоидов.

Лактагель® не следует применять в качестве средства контрацепции.

Не использовать тубик при нарушении его целостности.

Лактагель® может вызвать покалывание, ощущение жжения и зуд, например, при попадании внутрь трещин тканей влагалища. Это временный эффект. Если это сохранится, прекратите использование и, если вы обеспокоены, обратитесь за медицинской помощью. Обратитесь к врачу, если ваши симптомы ухудшаются, если вы испытываете боль, если дискомфорт не прекращается, если ваши выделения окрашены кровью или если выделения происходят во время менопаузы. Если после применения вагинального геля Лактагель® в соответствии с инструкциями вы не почувствовали облегчения симптомов, вам следует обратиться к врачу за дополнительной консультацией.

Применение во время беременности

Лактагель® можно применять во время беременности, однако при подозрении на наличие вагинальной инфекции во время беременности рекомендуется обратиться к врачу.

Применение у детей

Не предназначено для детей или применения детьми.

Противопоказания

Лактагель® не следует применять при наличии индивидуальной непереносимости к какому-либо из компонентов геля.

Способ применения

Лечение бактериального вагиноза (БВ)	
Для эффективного облегчения симптомов бактериального вагиноза – обильные выделения, неприятный запах, влагалищный дискомфорт	Применять 1 тубик ежедневно в течение 7 дней
Поддержание нормальной микрофлоры и рН влагалища	
При признаках БВ, для восстановления нормальной микрофлоры и рН влагалища: • Во время курса антибиотиков • После менструации	Повторить курс, применяя 1 тубик ежедневно в течение 7 дней



Лактагель® выпускается в тубиках для одноразового применения. Чтобы открыть тубик, поверните колпачок и снимите его. Полностью вставьте наконечник тубика во влагалище. Сдавите стенки тубика.

Не прекращая сдавливать, удалите тубик. После этого тубик можно выбросить.



Лучше всего использовать Лактагель® перед сном, так как некоторое количество геля может вытечь. Рекомендуется применять гигиенические прокладки для белья.

Условия хранения

Хранить при температуре от +2°С до +30°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок хранения

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Форма выпуска

В одном тубике для одноразового применения содержится 5 мл геля. Одна упаковка содержит 7 тубиков для одноразового применения и инструкцию по медицинскому применению на казахском и русском языках.

Условные обозначения



Обратитесь к инструкции по применению



Использовать до



Дата производства



Код партии



Изготовитель



Температурный режим



Не используйте повторно



Петля Мебиуса

Производитель/ Производственная площадка

Рольф Куллгрэн АБ, Оратан 4, 646 30 Гнеста, Швеция
Rolf Kullgren AB, Ågatan 4, 646 30 Gnesta, Sweden